

**Таблица 10. Режим дезинфекции куветов растворами средства "Медифокс-Дез" в целях профилактики и борьбы с бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями.**

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
В отделениях неонатологии - поверхности в помещениях, в том числе наружные поверхности куветов.	0.5	999.5	90	Протирание*	
	1	999	30		
	2	998	15		
Внутренние поверхности и приспособления кувета: матрасик в чехле, поддон матрасика, крышка воздушной завесы, подъёмные устройства, площадка ложа, колпак неонатальный, датчик температуры воздуха и кожи и др.	10	990	90	Протирание*	Двукратное протирание стерильной тканевой салфеткой, обильно смоченной в стерильной воде. Насухо вытирать стерильными салфетками после каждого промывания. Проветривание в течение 15 минут.
Приспособления кувета: наливная воронка, резервуар увлажнителя, металлический волногаситель, воздухозаборные трубки, шланги, узел подготовки кислорода и др.	20	980	60	Погружение	Двукратное погружение в стерильную воду по 5 минут каждое с тщательным промыванием всех каналов. Насухо вытереть стерильными салфетками. Проветривание в течение 15 минут.

\*Протирание: осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 кв.м обрабатываемой поверхности.