

**Таблица 5. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при туберкулезе.**

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
1. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	10	990	60	Протирание*	
	15	985	30		
	20	980	15		
	10	990	90	Орошение**	
	15	985	60		
	20	980	30		
2. Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт со следами крови (пятна крови, подсохшие пятна крови)	20	980	60	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Протереть тканевой салфеткой, обильно смоченной в водопроводной воде
	30	970	30		
3. Санитарно-техническое оборудование	15	985	120	Протирание (с помощью щётки, ерша или ветошью – 150 мл/м <sup>2</sup> поверхности) или орошение**	Промыть водопроводной водой
	20	980	60		
	25	975	30		
	10	990	60	Двукратное протирание (с помощью щётки, ерша или ветошью – 150 мл/м <sup>2</sup> поверхности) с интервалом 15 минут	
	15	985	30		
	20	980	15		
	10	990	90	Двукратное орошение** с интервалом 15 минут	
	15	985	60		
	20	980	30		
	40	960	30		
4. Посуда без остатков пищи	5	995	90	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой
	10	990	30		
5. Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования)	15	985	90	Погружение в раствор (2 л/комплект, ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду однократного использования – утилизировать
	20	980	30		
	25	975	15		
6. Предметы для мытья посуды	15	985	90	Погружение в раствор	Прополоскать в водопроводной воде и высушить
	20	980	30		
	25	975	15		

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
7.Посуда лабораторная (в том числе одноразового использования)	10	990	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой, посуду одноразового использования – утилизировать
	15	985	30		
	20	980	15		
8.Посуда из-под выделений (крови)	40	960	60	Погружение в раствор (ёмкость закрыть крышкой)	Промыть проточной питьевой водой.
	60	940	30		
9.Кровь, находящаяся в ёмкости (без сгустков)	40	960	60	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 (ёмкость закрыть крышкой)	Смесь обеззараженной крови и раствора дезинфектанта утилизировать
	50	950	30	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:5 (ёмкость закрыть крышкой)	
	60	940	30	Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 (ёмкость закрыть крышкой)	
10.Уборочный инвентарь	10	990	120	Замачивание в ёмкости	Прополаскать в воде и высушить
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		
11.Предметы ухода за больными (из металла, резины, пластмассы, стекла)	5	995	60	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Промыть проточной питьевой водой
	10	990	120	Протирание*	
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		
	10	990	90	Погружение в раствор	
	15	985	60		
	20	980	30		
25	975	15			
12.Игрушки (кроме мягких)	5	995	60	Двукратное протирание* с интервалом 15 минут	Промыть проточной питьевой водой, крупные - протереть тканевой салфеткой, обильно смоченной в водопроводной воде.
	10	990	120	Мелкие – протирание* или погружение, крупные – орошение**	
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		

Объекты обеззараживания	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	Действия по истечении времени обеззараживания
	Средство	Вода			
13. Бельё незагрязнённое (в том числе одноразового применения)	5	995	90	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения- утилизировать
	10	990	60		
	15	985	30		
14. Бельё, загрязнённое выделениями (в том числе одноразового применения)	10	990	120	Замачивание в ёмкости (5 л на 1 кг. сухого белья)	Постирать и прополоскать, бельё одноразового применения- утилизировать
	15	985	90		
	20	980	60		
	25	975	30		

**\*Протираание:** осуществляется ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл на 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности.

**\*\*Орошение:** при использовании гидропульта, автомакса – из расчёта 300 мл рабочего раствора средства на 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности; при использовании распылителя типа "Квазар" - из расчёта 150 мл рабочего раствора средства на 1 м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности.