

Применение средства "Медифокс Дез" для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.

**ТАБЛИЦА 1. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средств "Медифокс-Дез".
Обеспечивается дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.**

Вид обрабатываемых изделий	Режим обработки			Температура рабочего раствора, °С	Способ обработки	Действия по истечении времени обработки
	Количество средства и воды для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл		Время выдержки*/обработки, мин.			
	Средство	Вода				
Изделия медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты) из металла, резины, пластмассы, стекла, слюноотсосы, плевательницы	20	980	60	Не менее 18	Погружение	Отмывание проточной питьевой водой в течение 5 минут (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)
	30	970	30			
Стоматологические отсасывающие системы	20	980	60	Не менее 18	Прокачать раствор и оставить в системе	Отмывание проточной питьевой водой в течение 5 минут (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)
	30	970	30			
Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним	30	970	15	Не менее 18	Погружение	Отмывание проточной питьевой водой в течение 5 минут (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)

*Время выдержки/время дезинфекционной выдержки: интервал времени, необходимый для дезинфекции объекта при температуре дезинфекции. [ГОСТ 20509-75]